

ventrisana®

Parodontose Kaugummi

BELANO
medical

The Microbiotics Company

GEBRAUCHSINFORMATION

Bitte lesen Sie vor Einnahme von ventrisana® Parodontose Kaugummi diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

MEDIZINPRODUKT

ventrisana® Parodontose Kaugummi ist ein registriertes Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit wurden nach der Europäischen Verordnung für Medizinprodukte (2017/745) geprüft.

ANWENDUNGSGEBIET

ventrisana® Parodontose Kaugummi ist ein Medizinprodukt zur Anwendung im Mundraum. ventrisana® Parodontose Kaugummi reduziert die Besiedlung von Zahnbelägen, des Zahnfleisches und von Zahnfleischtaschen mit dem Erreger *Helicobacter pylori* durch die passive Bildung von Aggregaten und Spülung durch vermehrte Speichelbildung. ventrisana® Parodontose Kaugummi dient zur Vorbeugung langanhaltender Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) und Entzündungen des Zahnhalteapparats (Parodontose).

ZUSAMMENSETZUNG

Wirkstoff: ventrisana®
Hilfsstoffe: Kaugummi-Grundmasse, Xylit, Erythritol, Pfefferminzaromen, Siliziumdioxid, Magnesiumstearat, Menthol.
ventrisana® Parodontose Kaugummi enthält den patentgeschützten Wirkstoff ventrisana®. ventrisana® Parodontose Kaugummi ist zuckerfrei, vegan und enthält kein Salz, Gluten, Laktose oder Konservierungsstoffe.

DARREICHUNGSFORM UND INHALT

30 medizinische Kaugummis.
Zur Anwendung im Mundraum.

ANWENDUNG

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren kauen je nach Bedarf alle 2-3 Stunden zwischen den Mahlzeiten 1 Kaugummi für 20 bis 40 Minuten, ohne den Kaugummi herunterzuschlucken. Anschließend wird der Kaugummi entfernt und über den Hausmüll entsorgt. Maximal 6 Kaugummis täglich anwenden.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

Sollten sich 2-3 Tage nach Beginn der Anwendung die Symptome erheblich verschlechtert haben (wie z.B. bei Auftreten von starkem Zahnfleischbluten oder Zahnlockerungen), suchen Sie bitte einen Arzt auf. Übermäßiger Verzehr von Zuckeraustauschstoffen wie Erythritol und Xylit können zu Verdauungsbeschwerden wie Durchfall führen. Die Tagesdosis sollte daher 6 Kaugummi nicht überschreiten. ventrisana® Parodontose Kaugummi ist aufgrund der Gefahr des Verschluckens nicht empfohlen für Kinder unter 6 Jahren oder Personen mit Schluckstörungen. Bitte kauen Sie den Kaugummi nicht im Liegen, z.B. beim Einschlafen, da sonst die Gefahr des Verschluckens besteht.

GEGENANZEIGEN

ventrisana® Parodontose Kaugummi darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeit (Allergie) ventrisana® Parodontose Kaugummi nicht nochmal anwenden. Das Medizinprodukt enthält Zuckeraustauschstoffe. Bitte wenden Sie ventrisana® Parodontose Kaugummi daher erst nach Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckeraustauschstoffen leiden.

SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

Zur Anwendung dieses Medizinproduktes während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine Untersuchungen vor. Verwenden Sie dieses Produkt daher während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt. Um Wechselwirkungen zu vermeiden, sollten Sie ventrisana® Parodontose Kaugummi zwei Stunden versetzt zu Arzneimitteln einnehmen oder Ihren Arzt befragen.

NEBENWIRKUNGEN

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt.

AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

Kühl (unter 25°C), trocken und außer Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
Verwendbar bis: siehe Angaben auf der Faltschachtel und dem Blister.

WARNHINWEISE

Ist das angegebene Verfallsdatum überschritten, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

ENTSORGUNG

Das Produkt kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

MELDUNG VON VORKOMMNISSEN

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.



BELANO medical AG
Neuendorfstraße 19
D-16761 Hennigsdorf



Nutrín GmbH
Schnaid 36 b
D-91352 Hallerndorf

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die BELANO medical Kundenberatung:
info@belanomedical.com

Bedeutung der Symbole auf der Packung:

Hersteller



Vertrieb



Oberer Temperaturbegrenzung 25°C



Verwendbar bis



Bitte Gebrauchsinformation beachten



Chargenbezeichnung



Medizinprodukt



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden

MEDIZINPRODUKT

Die Ursache von Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) sind Bakterien, die sich in Form von Zahnbelag als Biofilm auf der Zahnoberfläche ansetzen. Die Bakterien und ihre Giftstoffe führen zu einer Entzündung des Zahnfleisches. Entwickelt sich die Entzündung, entstehen zunehmend tiefere Zahnfleischtaschen, in denen sich nun andere Bakterien einnisten können. Dort können sich nun weitere Gewebe entzünden und zu einem Abbau des Kieferknochens führen. Dieser entzündliche und fortschreitende Abbau des gesamten Zahnhalteapparates ist die Parodontose. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass bei langanhaltenden Zahnfleischentzündungen und Parodontose in Zahnbelägen und Zahnfleischtaschen oft auch der Magenkeim *Helicobacter pylori* vorhanden ist. Bleiben bakterielle Erkrankungen wie Gingivitis und Parodontitis über einen längeren Zeitraum unbehandelt, breiten sich die daraus resultierenden Bakterien unter Umständen im ganzen Organismus aus.

ventrisana® Parodontose Kaugummi enthält den Wirkstoff **ventrisana®** aus *Lactobacillus reuteri* DSM 17648. Das Medizinprodukt reduziert die Besiedlung von Zahnbelägen, Zahnfleisch und Zahnfleischtaschen mit dem Krankheitserreger *Helicobacter pylori* durch Verklumpung des Erregers mit den abgetöteten Milchsäurebakterien. Diese Klumpen werden durch den Kaugummi und den durch das Kauen vermehrt freigesetzten Speichel entfernt und unschädlich gemacht. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, kauen sie **ventrisana® Parodontose Kaugummi** mindestens für 20 Minuten. Somit unterstützt **ventrisana® Parodontose Kaugummi** die natürlich reinigende und schützende Funktion des Speichels. **ventrisana® Parodontose Kaugummi** reduziert bei regelmäßiger Anwendung *Helicobacter pylori* im Mundraum und kann damit einer weiteren Ausbreitung des Keims im Körper vorbeugen. **ventrisana® Parodontose Kaugummi** dient zur Vorbeugung langanhaltender (chronischer) Gingivitis und Parodontose mit den Symptomen gerötetes, geschwollenes und beim Zähneputzen blutendes Zahnfleisch, sowie der entzündlichen Vertiefung der Zahnfleischtaschen.